

CardiAid[®]
Automatisk Ekstern Defibrillator



Hjertestarter

“Enkel og Effektiv”

www.cardiascandinavia.com

Hersegade 20 - 4000 Roskilde
Telefon: 7033 5353
Fax: 3211 3253
info@cardiascandinavia.com

CARDIA
SCANDINAVIA^{ApS}



Når du mindst venter det i hverdagen



Alle kan få hjerteproblemer, hvor som helst og når som helst



Ring alarmcentralen 112 efter hjælp eller få en anden til at gøre det



Læg derefter patienten på gulvet, sørg for frie luftveje og undersøg om der er tegn på liv



Tag CardiAid hjertestarteren ned fra væggen



Hjertestarteren tænder automatisk, når den åbnes. Følg de givne instrukser



Hvis det er nødvendigt, så brug saksen i hjertestarterens førstehjælpssække til at klippe tøjet af patienten




Åben pakken med elektroderne



Fjern filmen fra elektroderne



Sæt elektroderne på patientens nøgne bryst som vist på tegningerne på elektroderne

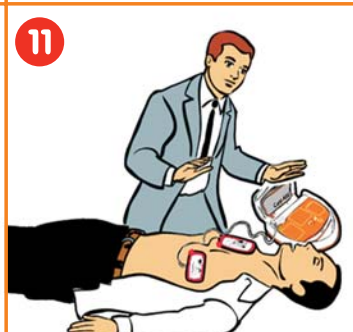

CardiAid hjertestarteren analyserer automatisk hjerterytmen. Berør ikke patienten fra nu af



Hvis det er nødvendigt vil CardiAid apparatet informere brugeren om at stød forberedes.



CardiAid hjertestarteren giver stød, når der trykkes på den røde stød knap.



Nu kan du røre patienten. CardiAid hjertestarteren vil guide dig igennem resten af forløbet.



Fortsæt med førstehjælp. Start med at give 30 gange hjertemassage



Giv nu to mund til mund indblæsninger